



## ご使用について



セレナイトは、口呼吸を防ぎを鼻呼吸を促進する、鼻呼吸テープ・口閉じテープです。

鼻呼吸をすることによって、いびきの軽減、口内環境が整う、顔のたるみの防ぐなど様々なメリットを得ることができます。

一般的な鼻呼吸テープと異なり、医療用の低刺激シリコン粘着剤を使用しているため、鼻づまりや呼吸が苦しくなったときなど、睡眠中に何かあったときでも、無理なくはがすことができる安全性が大きな特徴です。

### < ご使用方法 >

就寝前にあご部分から口角にかけて、リフトアップするように貼ってください。

### < ご使用上の注意 >

- 傷口や異常のある皮膚には使用しないでください。
- 粘着製品により、皮膚トラブルを起こしやすい方は、事前に医師または薬剤師にご相談ください。
- シリコンに対してアレルギー体質の方は使用しないでください。
- 本品は低刺激性のシリコン系粘着剤を使用しておりますが、重度な浮腫の方、皮膚が非常に弱い方など、すべての人に全く皮膚障害が起きないというわけではございません。
- 本品の使用により、発疹、発赤、かゆみなどの症状が現れた場合には使用を中止し、医師または薬剤師に相談してください。
- 貼る前に皮膚を清潔にし、よく乾かしてください。
- はがすときは、皮膚を傷めないようテープを折り返し、皮膚が持ち上がらないように手で押さえながら、ゆっくりはがしてください。

※本製品で使用しているテープは ISO 10993-1 の生物学的安全性評価ガイドラインにしたがって細胞毒性・感作性（アレルギー反応）・刺激性が十分に低いことが確認された材料を使用しております。

お問い合わせ・感想はこちらからお願いいたします



<http://serenight.jp/contact/>