

装着快適！

# 無縫製 ニットマスク 取り扱い方法



マスクの着用については、写真の様に  
とがった方が上にくるようにご着用ください。  
(穴が開いた方が下側になります。)

## 1 ニットマスクの応用着用編



ティッシュペーパーを二つ折りにし、更に三つ折りにしてください。

ニットマスクの下側が2重の袋状になっていますので  
間から差し込んでください。

最後に鼻の部分で折り曲げて調整してください。

## 2 洗濯方法

洗濯時には、衣料用洗剤を溶かした水にマスクを10分間浸し、押し洗いをおこなってください。

その後水道水ですすいで水気を切ってください。

最後に水道水ですすいだ後にタオルで水分を吸い取り、形を整えて干してください。

乾燥は耳の部分で吊り干しするのではなく、あごの部分(袋状に開いている所)で吊り干しするか、もしくは平干して乾燥させてください。耳の部分は伸びやすいので、ご注意ください。



お申込みお問い合わせ

 **イイダ靴下株式会社**

TEL 0952-86-3412 9:00~17:00

URL [https://peraichi.com/landing\\_pages/view/washablemask/](https://peraichi.com/landing_pages/view/washablemask/)