

ご使用の際は、この文書を必ずお読みください。

また、必要時に読めるよう製品と一緒に保管してください。

2021年10月8日改訂(第3版)
2021年5月21日作成(初 版)

医療機器届出番号：13B1X10168BBS001

手動式生体洗浄器
JMDN コード：70962001
一般医療機器 クラス I

ビビソー

(鼻美爽、BIBISOO)

【形状・構造及び原理】

本品は、あらかじめ充填された充填液を手動で噴霧する生体用洗浄器です。

・接触部の組成

【容器】ポリエチレン

【充填液】精製水、トレハロース、クエン酸ナトリウム、塩化ナトリウム、ベンザルコニウム塩化物

【使用目的又は効果】

- ・鼻腔粘膜に付着したウイルス、細菌、花粉、及び煤煙・塵埃・ハウスダスト等の浮遊物質を洗い流します。
- ・鼻腔内洗浄後の鼻腔粘膜の保護、保湿をして浮遊物質を鼻腔内で補足しやすくします。
- ・鼻腔内粘液・分泌液を洗い流し、鼻通りを向上させることにより、鼻呼吸をしやすくなります。
- ・鼻腔粘膜を弱酸性の安定状態に維持して、健全な鼻腔内の生理環境を守ります。

【使用方法】

- ① キャップを外し、先端を鼻腔内に軽く入れてください。
- ② 容器のノズルを引いてください。3回ずつ両鼻腔内に噴射します。
- ③ 朝昼晩と就寝前 1日4回を目安に使用してください。
- ④ 鼻腔内に噴射後はしばらく上を向いて、噴射した液が鼻腔内にとどまるようにしてください。

【使用上の注意】

- ・鼻腔へのスプレー洗浄にのみ使用してください。
- ・小児の場合、保護者の監視下で使用させてください。
- ・使用中に万一異常、違和感が発生した場合、直ちに使用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。
- ・耳鼻咽喉科の治療を受けている方は、使用前に医師又は薬剤師にご相談ください。

〈保管及び取り扱い上の注意〉

- ・使用時は縦向きでご使用ください。横向きにすると噴霧されない場合があります。
- ・使用後はティッシュ又は清潔なガーゼで先端を拭き、キャップをして清潔に保管してください。

【包装】

一個 (内容量：30ml)

【製造販売業者の名称及び住所等】

製造販売業者：株式会社ネクスト21
〒113-0033 東京都文京区本郷 3-38-1 本郷信徳ビル 8 階
電話番号 03-5840-8830 (代表)

 NEXT 21