


PORTABLE  
SPLASH SHIELD

ポータブル スplashシールド  
新型コロナウイルス感染患者の緊急搬送時に救急隊をまもるシールド

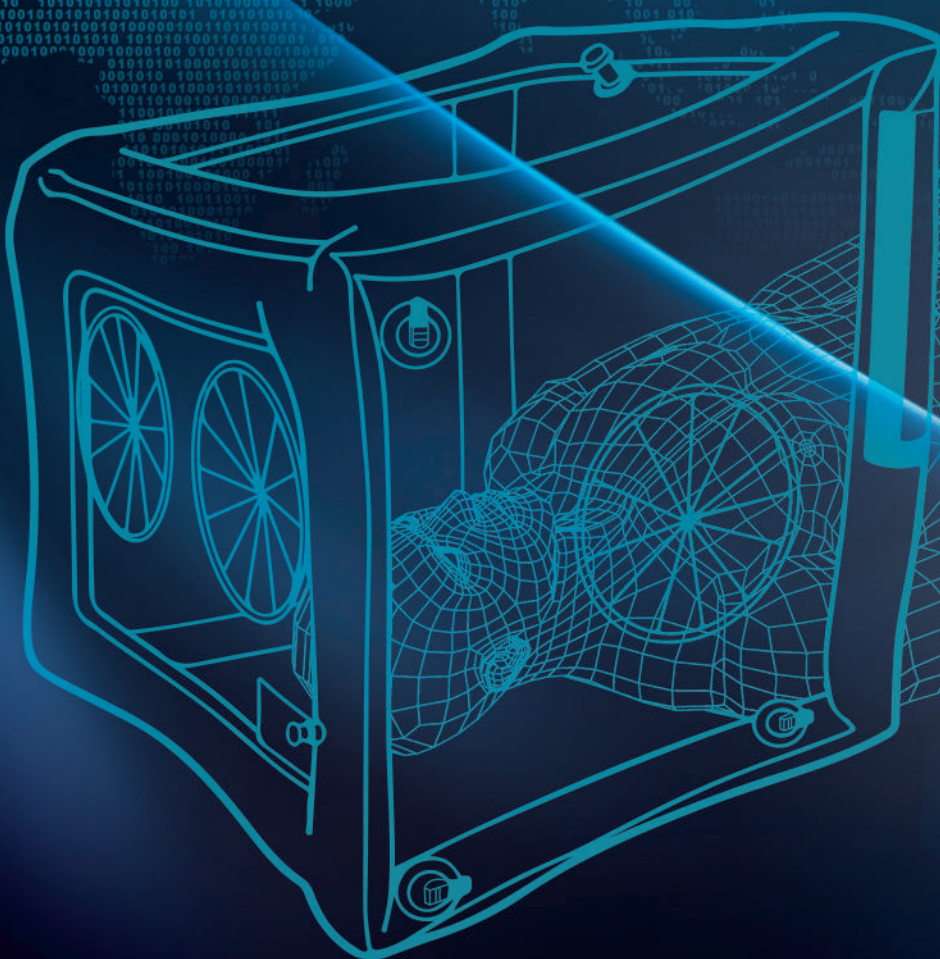

# ポータブル スプラッシュシールド

新型コロナウイルス感染症患者の緊急搬送時に  
救急隊員をまもるシールド

新型コロナウイルス感染症患者および疑い患者の搬送に適した、  
救急車に常備できる操作性に富んだ防御器具です。  
救急隊員が患者搬送や気道確保などエアロゾルが多く発生する処置をする際に  
シールドを装備することで、エアロゾルの暴露を低減します。

※本製品は、国立大学法人岡山大学と共同研究を実施し製品化しています。  
※消防庁「消防防災科学技術研究推進制度」2021年度委託研究として実施しました。

気管挿管時  
感染予防

心肺蘇生時  
感染予防

シールド内  
エアロゾル  
吸引可能

救急車内  
収納可能

※吸引フィルターはオプションです。

## 製品仕様

ポータブルスプラッシュシールド

サイズ	本体 / W530×D460×H560(mm) ※空気量によって異なる
重量	約 850g
材質	空気層 / TPU(熱可塑性ポリウレタン) 窓・カーテン / TPU(熱可塑性ポリウレタン) 手技窓 / PVC(ポリ塩化ビニール) バルブ / PVC(ポリ塩化ビニール)・TPU(熱可塑性ポリウレタン) 芯材 / PE(ポリエチレン) 面ファスナー / ナイロン等 バルブ用外付けキャップ / PVC(ポリ塩化ビニール)

## 商品構成

シールド本体 ×1 / ハンドポンプ ×1 / 空気抜き栓 ×1 / ご利用ガイド ×1  
(オプション：吸引用フィルター)

## 組立方法

### | 空気の入れ方 |

付属のハンドポンプで本体底面から  
空気を注入します。シールド本体を立てて  
側面から空気を注入します。

※空気の注入回数は空気栓の近くにある注意シールに表記された回数を守りご使用ください。

**注意事項** ▲シールドへ空気を入れすぎないでください。破損の原因になります。▲火気の近くや高温多湿、直射日光の当たる場所でのご使用や保管はお控えください。  
▲破損の恐れがあるため鋭利なものとは接触させないでください。

詳しくは弊社ホームページ <https://www.hivix.co.jp/> をご覧ください。

原産国：日本

contact us

製造販売元：株式会社ハイビックス

〒501-0305 岐阜県瑞穂市宮田 245 番地  
FAX (058)-328-3136

TEL (058)-328-3131