

廃棄物からの感染リスクを軽減

感染対策



使用済みのPPE（個人防護具）や紙おむつ。排泄介助や処置で使ったペーパータオル、ガーゼ等。これらの廃棄物からの二次感染のおそれがあります。エコムシュウは、これらの廃棄物を「簡単」「清潔」「スピーディー」にパック！！使用する専用パックテープは、特殊素材を使用しており、臭いだけではなく**大腸菌・ノロウイルス・コロナウイルス**などの「**菌・ウイルス**」の拡散も防止します。



菌やウイルスを瞬時にパック！！

直接中身に触れない！！

**7日間
菌・ウイルスの
検出なし！**

CareFort

* 鋭利なもの・硬いもの・水分のみはパックすることができません。
* 適切な着脱方法を取り、外側を中に折りたたみ投入ください。
* エコムシュウ本体も環境クロス等で定期的に清掃してください。

■ 製品仕様

	エコムシュウ 一度に2~3個 まとめてパックできる 通常タイプ		エコムシュウ COLON トイレや各部屋など 小スペースの設置に ビックリ コンパクトタイプ	
型番	EMY-4555B		EMY-3530B	
装置寸法	W440×D585(取手を含むと698)×H900mm		W440×D485(取手を含むと598)×H900mm	
重量	39kg(バックテープ除く)		38kg(バックテープ除く)	
電源	バッテリー内蔵、連続駆動時間:6時間(無負荷運転)、 充電時間:通常4時間		バッテリー内蔵、連続駆動時間:6時間(無負荷運転)、 充電時間:通常4時間	
安全性	(1)起動条件成立確認 (2)非常停止スイッチ (3)上部カバー押下			

■ バックテープ仕様

	エコムシュウ	エコムシュウ COLON
品番	CC-450G(特許第4195912号)	CC-350G(特許第4195912号)
形態/重量/寸法/色	ロール状/2.5kg(セット)/W450mm×L100m/グリーン	ロール状/2.0Kg(セット)/W350mm×L100m/グリーン
バックテープ残量確認	バックテープ交換マーク付き	
バックテープ処理	各自治体の処理方法に従ってください	
入り数	5セット/ケース(2ロール/セット)	


※直射日光を避け、常温常湿の場所で保管してください。

■ 試験検査報告 ●N.D.=検出限界以下 ●<10=検出せず

菌・ウイルス名	Feline infectious peritonitis virus (ネココロナウイルス) ※1-①	Feline calicivirus (ネコカリシウイルス) ※1-②	E.coli (大腸菌) ※2	St.aureus (黄色ブドウ球菌) ※2	C.difficile (クロストリジウム) ティアフィシル ※3
直後	N.D.	N.D.	<10	<10	<10
1日後	N.D.	N.D.	<10	<10	<10
3日後	N.D.	N.D.	<10	<10	<10
7日後	N.D.	N.D.	<10	<10	<10

※1 試験依頼先:学校法人北里研究所 北里大学メディカルセンター
 ①ネココロナウイルス(ヒトコロナウイルス代替) 試験番号:No.01201
 ②ネコカリシウイルス(ノロウイルス代替) 試験番号:No.01201
 ※2 検査:社団法人京都微生物研究所 報告書番号:No.8171~8174
 ※3 試験依頼先:財団法人日本食品分析センター 試験成績書発行番号:第11036258001-01号

菌・ウイルスや臭いを衛生的に密封

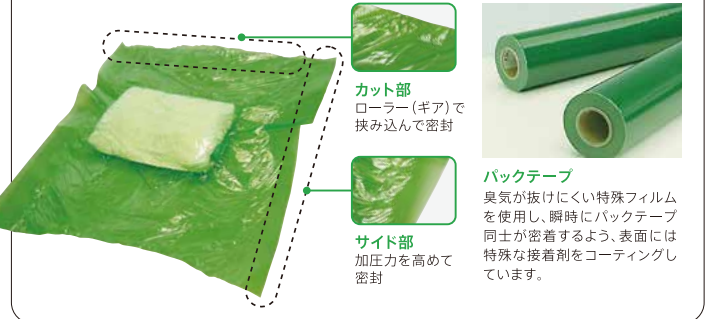

カット部
ローラー(ギア)で挟み込んで密封

サイド部
加圧力を高めて密封

バックテープ
臭気が抜けにくい特殊フィルムを使用し、瞬時にバックテープ同士が密着するよう、表面には特殊な接着剤をコーティングしています。

エコムシュウ は、「NEDO 技術開発機構」
福祉用具実用化開発費助成金を受けて開発しました!

NEDO 国立研究開発法人
技術開発機構 新エネルギー・産業技術総合開発機構

産学官の総力を結集して、我が国の産業技術とエネルギー・環境技術の未来を創る
 このような技術開発を目指し、我が国最大規模の中核的な技術開発実施機関として、
 高度なマネジメント機能を提供する国立研究開発法人です。

◎Webサイトのご案内

詳しくは
こちらから



<http://www.ecomush.com/>

CareFort

ケアフォート株式会社
 〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町 2-105-1214
 TEL: 03-6384-0410 (代) FAX: 03-6811-6131
 大阪支店
 〒543-0021 大阪府大阪市天王寺区東高津町 11-9
 TEL: 06-6763-4583 (代) FAX: 06-6768-9176
 名古屋支店
 〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南 2-14-19
 TEL: 052-582-6871 (代) FAX: 052-561-8525

お問い合わせは