

持ち運びできる  
業務用複合フェイシャル美容機器

## MIB ルミナス Beauty Box



- ✓ 安心の日本製
- ✓ 業務用の高出力
- ✓ 持ち運びラクラク設計
- ✓ 出張エステに最適
- ✓ これ1台で全てを叶える複合機
- ✓ 使い方自由、あなた次第




# Mobile Indulgence Beauty

introduction of Product —

## 次世代エステの 新たな形

### エレクトロポレーション

安定した電気パルスが美容成分をお肌へ有害成分をブロックするお肌の機能により、本来お肌は美容成分もブロックしていると言われております。PORの特殊波形で、お肌が本来持つ機能によって通過できない美容成分を皮下組織まで届けます。

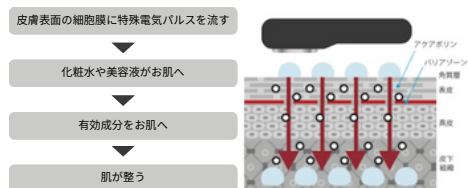


#### 【エレクトロポレーション導入器】

エレクトロポレーションモード (POR) を設定し、美容液をお顔全体にたっぷりとなじませた後、導入器をお肌に当てます。電力は心地よいレベルに調整し、顎のラインから上方向へ引き上げるようにプローブを動かします。これにより、美容液が肌の奥深くまで浸透します。

### EMS+バイブレーション

微弱電流と振動で筋肉運動と美容成分の拡散を同時に

EMSの作用で頭皮やお肌を柔らかくします。加えてバイブレーションによる美容因子の拡散効果により、エステサロンのタッピング同様の効果が期待されます。

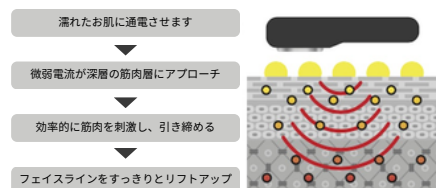


#### 【シワたるみに EMS】

リフトアップにはEMSモード (EMS) を設定し、水分を十分に含んだお肌にプローブを当てます。微弱電流による電気刺激が筋肉を効果的に活性化。電力は心地よいレベルに調整し、顎のラインから上方向へ引き上げるようにプローブを動かします。

### イオン導入

微弱電流で美容成分を肌に届け閉じ込める  
微弱電流の力でうおい成分を表皮層全体に届けます。  
お肌のうるおい効果を高めることができ、みずみずしいお肌によりがえります。

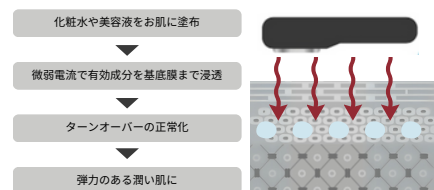

#### 【お肌ケア イオン導入】

イオン導入はイオンモード (ION) に設定し、お肌にたっぷりと水分のある状態からプローブをお肌に当てます。水溶性の成分を微弱電流で流し、皮膚の表皮層まで浸透、ターンオーバーを正常化。ハリやツヤ、弾力を取り戻す効果があります。

### 目元口元プローブ



#### 【目元口元集中ケア】

低周波の細かいパルスが肌の抵抗を少なくして深部まで電流を届け、筋肉の収縮運動をさせることで表情筋を刺激します。効率的な筋肉運動を維持することで、皮膚を支える土台から引き締め、ハリのある美肌へと導く表情筋ケアを実現します。

### スクライバー



#### 【毛穴のお掃除】

超音波振動を活用し、毛穴の汚れや古い角質を効果的に除去します。深部クレンジングや古い角質の除去、血行促進、毛穴の引き締めといった多角的な効果で、肌トラブルを改善。クリアで健やかな美肌へと導きます。

### 頭皮ケア&ヘッドマッサージ



#### 【頭皮ケア&ヘッドマッサージ】

育毛剤などの溶液を頭皮にたっぷりとなじませ、頭皮専用プローブを使用します。IONまたはEMSモードに設定し、電極が頭皮にしっかりと密着するように押し当てます。強めのレベルで使用することで、薄毛ケアや頭皮マッサージなど、目的に合わせたケアが可能です。

株式会社サバス

代表取締役 稲部 ゆかり

神奈川県横浜市青葉区美しが丘 4-1-3-GI ビル IF

045-482-6820



sabbath6820@yahoo.co.jp



[www.reallygreatsite.com](http://www.reallygreatsite.com)